

ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA MODEL RI/SY300/200**1. SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA**

Navodila, katera je potrebno upoštevati pred uporabo antidekubitusne blazine:

- Ob prejemu izdelka preverite, če imate vse potrebne dele in preverite, če je mogoče izdelek poškodovan npr. zaradi transporta. V primeru poškodbe kontaktirajte prodajalca.
- Shranite vso embalažo za morebiten transport.
- Ne posegajte v delovanje črpalke med obratovanjem in jo vedno izklopite iz napetosti predno jo premikate.
- Ne postavljajte antidekubitusne blazine blizu izvora toplote.
- Ne uporabljajte črpalke blizu vode ali na mokri podlagi.
- Ne postavljajte črpalke na nestabilne površine.
- Uporabljen mora biti pravilna električna moč ter napetost, kot je označeno na napravi.

2. FUNKCIJE ČRPALKE

Pravilna in varna uporaba črpalke je omogočena samo v primeru upoštevanja sledečih priporočil:

- Naprava je zaščitena pred vdorom vode.
- Antidekubitusna blazina se ne sme uporabljati v bližini vnetljivih snovi.
- Črpalka je namenjena neprekinjeni uporabi.

3. TEHNIČNI PODATKI

Označeni na nalepki pri črpalci.

4. UPORABA IN DELOVANJE

- Postavite črpalco na tla ob postelji na stabilno podlago ali pa jo obesite na posteljo s pomočjo obešal na hrbtnem delu črpalke.
- Priklopite na napetost 220 V.
- Položite PVC blazino na vašo obstoječo vzmetnico, priklopite cevi za zrak in jo postavite tako, da bodo cevi pri nožnem delu postelje.
- Povežite obe cevi iz blazine na črpalco.
- Pritisnite zelen gumb na vklop.
- Zavrtite stikalo za pritisk na najvišjo stopnjo (10).
- Počakajte 20/35 minut, da se vsak drugi prekat na blazini popolnoma napihne.
- Položite uporabnika na blazino.
- Nastavite stikalo za pritisk na položaj, kateri odgovarja teži uporabnika.

**RAZPON PRETOKA ZRAKA**

TEŽA	POLOŽAJ GUMBA
DO 50KG	POLOŽAJ 1-2
50KG-65KG	POLOŽAJ 3-4
65KG-85KG	POLOŽAJ OD 5 DO 7
85KG-120KG	POLOŽAJ OD 8 DO 10

SOČA OPREMA d.o.o.

Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana, tel. 01 437 42 52, mob. 051 220 726, ljubljana@socaoprema.si
Dvorakova ulica 14, 2000 Maribor, tel. 02 292 60 12, mob. 051 424 404, maribor@socaoprema.si
www.socaoprema.si

Ko je blazina v uporabi črpalka samodejno izmenjuje zrak med prekati blazine. Na ta način blazina preprečuje preležanine in izboljšuje prekrvavitev.

5. VZDRŽEVANJE

Blazina proti preležaninam je izdelana tako, da je raven vzdrževanja čim manjša in je zagotovljeno pravilno delovanje skozi celotno življenjsko dobo naprave.

POMEMBNO:

Pred vsako motnjo na napravi izključite kabel iz glavne vtičnice.

- Črpalko vedno obrišite s krpo. Nanjo ne polivajte nobene tekočine.
- Blazino lahko čistite z vodo in z večino čistil. Uporabljajte mehke krpe.
- Občasno očistite cevi katere pošiljajo zrak v blazino. Prepričajte se, da cevi niso blokirane zaradi prahu.

POGOJI GARANCIJE:

Vsak sestavni del blazine proti preležaninam ima garancijo na okvare.

POMEMBNO: V primeru uveljavljanja garancije je potrebno predložiti potrdilo o nakupu.

Garancija velja od datuma nakupa izdelka.

Garancija vključuje zamenjavo okvarjenih delov in delo, potrebno za njihovo zamenjavo.

Veljavna je le, če je bila naprava uporabljena v skladu z navodili proizvajalca.

GARANCIJA NI VELJAVNA:

- Če se aparat ne uporablja pravilno.
- V primeru napak zaradi nepravilne vgradnje aparata.
- V primeru škode, nastale bodisi zaradi napačne uporabe ali napačnega upravljanja sistema oziroma popravila, ki ga je opravil nepooblaščen servis.
- V primeru škode nastale zaradi običajne obrabe izdelka.

V PRIMERU OKVARE:

- Prinesite aparat za popravilo na prodajno mesto ali na pooblaščen servis, aparat naj bo zapakiran v originalni škatli.
- Priložite potrdilo o garanciji, skupaj s potrdilom o nakupu in zahtevkom za servis.

Garancija velja za obdobje 12 mesecev, razen v posebnih primerih.

PROBLEMI IN REŠITVE:

Polnjenje presega naveden čas.	Počakajte 10/15 minut, da boste videli ali aparat deluje pravilno. Če pri tej točki ležišče ni popolnoma napolnjeno, je bolje, da se obrnite na prodajalca.
Lučka ne sveti, ko imate prižgan aparat.	Preglejte varovalko.
Hrup. Ponoči se stopnja hrup v okolici zmanjšuje, zato se lahko sliši rahlo brnenje, katerega povzroča črpalka.	Nasveti kako zmanjšati raven hrupa: 1. Cevi za zrak in črpalko vedno postavite pri nožnem delu postelje. 2. Postavite črpalko na tla ob posteljo ali na ravno površino.

SOČA OPREMA d.o.o.

Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana, tel. 01 437 42 52, mob. 051 220 726, ljubljana@socaoprema.si

Dvorakova ulica 14, 2000 Maribor, tel. 02 292 60 12, mob. 051 424 404, maribor@socaoprema.si

www.socaoprema.si