

NAVODILA ZA MONTAŽO ELEKTRIČNO NASTAVLJIVE NEGOVALNE POSTELJE BURMEIER DALI ECONOMIC



Negovalna postelja je ob prevzemu sestavljena v pokončnem položaju na kolesih tako, da jo lahko enostavneje transportirate. Namestite jo v prostor, kjer jo želite montirati. Če so posamični deli še zvezani z vezicami, bodite pozorni na električni kabel, ko režete vezice.

KORAK 1 - MONTAŽA LEŽIŠČA:

- Odstranite trapez in ograje iz transportnih nosilcev v kolikor so priloženi postelji.
- Odstranite obe polovici ležišča iz transportnih nosilcev.
- Združite obe polovici ležišča ter jih privijte s štirimi vijaki.
- Priključite batnice motorja na drugo polovico ležišča ter jo zavarujte s hitro spojko.

KORAK 2 - MONTAŽA KONČNIC:

- Odstranite obe posteljni končnici iz transportnih nosilcev.
- Posteljni končnici montirajte na ležišče. Pri tem bodite pozorni na označbe pri posamični končnici in na ležišču. Vzglavna končnica ima nalepko, ki prikazuje dvignjeno vzglavje, enako je označeno tudi na ležišču. Postopek ponovite še z nožno končnico.
- Obe končnici pričvrstite na ležišče z vijaki iz transportnih nosilcev (v kolikor transportnih nosilcev niste imeli, so vijaki že na ležišču).

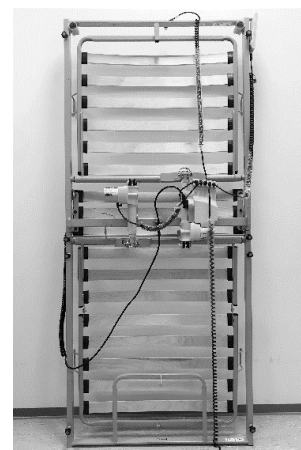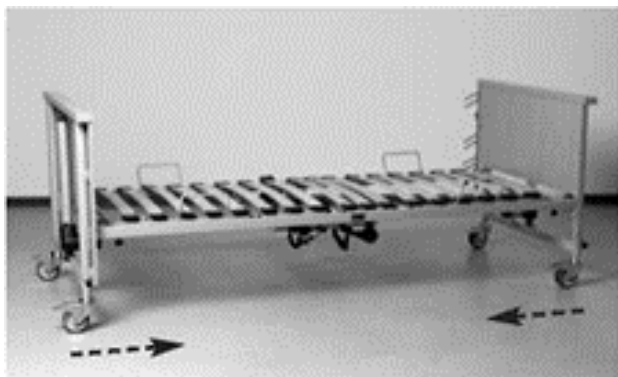

*transportna nosilca
 (ne potrebujete ob sestavi postelje)*



KORAK 3 - PRIKLJUČITEV KABLOV:

Krmilna enota oskrbuje s potrebno napetostjo pogonske motorje preko spiralnega kabla.

Spiralna kabla sta označena s številko objemke:

- 2 Motor za višino vzglavne končnice
- 4 Motor za višino nožne končnice



Bodite pozorni, da priključek na kablu vstavite v motor do konca, šele nato boste lahko vstavili PVC varovalo priključka (objemka). Pazite, da so vsi kabli prosto viseči tudi med dvigovanjem postelje (ne napeti) in da niso (v izogib poškodbi kablov – preščipu) nameščeni med gibljivimi komponentami postelje.

KORAK 4 - MONTAŽA OGRAJ:

- Na vsakem vogalu končnic se nahaja vodilo na katerega se montirajo ograje.
- Natakните ograje na vodilo na obeh straneh (pri tem pazite, da je zaobljen del vodila obrnjen navzgor).

DEMONTAŽA OGRAJ:

- S prstom pritisnite na oranžni gumb, ki se nahaja med vodilom in ograjico ter jo snemite.


KORAK 5 - MONTAŽA TRAPEZA:

- Trapez lahko namestite na levo ali desno stran ležišča.
- Odprtini se nahajata v skrajnem levem in desnem vzglavnem kotu ležišča.
- Nastavite višino obešala za pomoč pri dvigovanju.

ZAKLEPANJE FUNKCIJ

Negovalna postelja ima možnost zaklepa posamičnih funkcij. Funkcije zaklepate s priloženim ključem, ki se nahaja na kablu daljinskega upravljalca. S premikom ključa v desno za 15° se posamična funkcija negovalne postelje zaklene.

bodite pazljivi na številko objemke in številko na motorju posamezne končnice

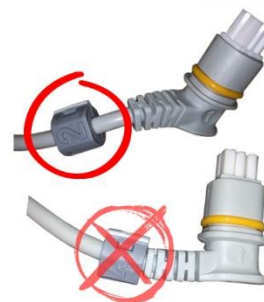

za odstranitev ograjice s prstom pritisnite kot je označeno



V PRIMERU, DA PRI MONTAŽI POTREBUJETE DODATNE NAPOTKE IN INFORMACIJE, NAS PROSIM OBVESTITE.