


NAVODILA ZA SESTAVO ELEKTRIČNA NEGOVALNA POSTELJA ECONOMIC II

Postelja je ob prevzemu sestavljena v pokončnem položaju na kolesih, da jo lahko enostavneje transportirate. Namestite jo v prostor, kjer jo želite montirati. Če so posamični deli še zvezani z vezicami, bodite pozorni na električni kabel, ko režete vezice.

KORAK 1

MONTAŽA LEŽIŠČA:

- Odstranite trapez ter ograje iz transportnih nosilcev v kolikor so priloženi postelji.
- Odstranite obe polovici ležišča iz transportnih nosilcev.
- Združite obe polovici ležišča ter jih privijte s štirimi vijaki.
- Priključite batnice motorja na drugo polovico ležišča ter jo zavarujte s hitro spojko.

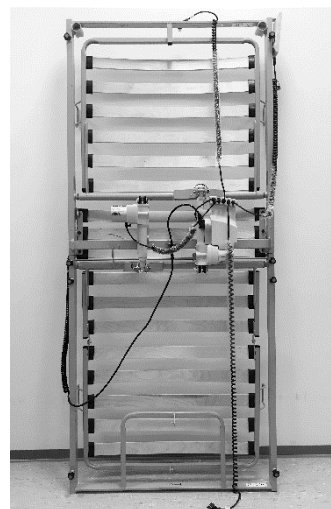



KORAK 2

MONTAŽA KONČNIC:

- Odstranite obe posteljni končnici iz transportnih nosilcev (transportni nosilci služijo samo za transport in niso del postelje).
- Posteljni končnici zmontirajte na ležišče. Pri tem bodite pozorni na označbe pri posamični končnici in na ležišču. Vzglavna končnica ima nalepko, ki prikazuje dvignjeno vzglavje, enako je označeno tudi na ležišču. Postopek ponovite še z nožno končnico. Obe končnici pričvrstite na ležišče z vijaki iz transportnih nosilcev (v kolikor transportnih nosilcev niste imeli, so vijaki že na ležišču).



TRANSPORTNA NOSILCA

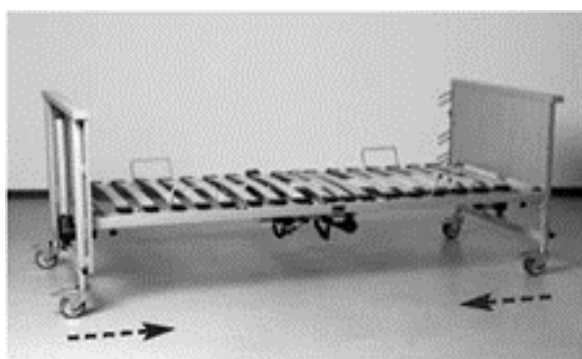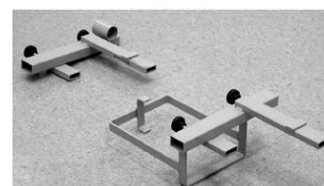

KORAK 3

PRIKLJUČITEV KABLOV:

Krmilna enota oskrbuje pogonske motorje preko spiralnega kabla, s potrebno napetostjo.

Spiralni kabli, ki vodijo do vsakega pogonskega motorja so na krmilni enoti označeni na naslednji način:

- 1 Motor za vzglavje
- 2 Motor za zgornji del nog
- 3 Motor za višino vzglavne končnice
- 4 Motor za višino nožne končnice

HB Daljinski upravljalac

- Napajalni kabel

Bodite pozorni, da priključek na kablu vstavite v motor do konca, šele nato boste lahko vstavili PVC varovalo priključka (objemka). Pazite, da so vsi kabli prosto viseči tudi med dvigovanjem postelje (ne napeti) in da niso (v izogib poškodbi kablov – preščipu) nameščeni med gibljivimi komponentami postelje.



KORAK 4

MONTAŽA OGRAJ:

- V električno omrežje priklopite posteljo z napajalnim kablom
- Preko daljinskega upravljalca dvignite višino celotne postelje za cca. 30 cm, saj boste tako lahko lažje zmontirali ograje.
- Na vsakem vogalu končnic se nahaja vodilo na katerega se montirajo ograje.
- Odstranite varnostni vijak ter z gumbom na vodilih na vsaki strani izvlecite vodilo iz tirnic.
- Natakните ograje na vodilo na obeh straneh ter jih ponovno vstavite v tirnico (pri tem pazite, da je zaobljen del vodila obrnjen navzgor).
- Privijte vijak in enako ponovite z ograjami še na drugi strani postelje.



KORAK 5

MONTAŽA TRAPEZA:

- Trapez lahko namestite na levo ali desno stran ležišča. Odprtini se nahajata v skrajnem levem in desnem vzglavnem kotu ležišča.
- Nastavite višino obešala za pomoč pri dvigovanju.

ZAKLEPANJE FUNKCIJ

Postelja ima možnost zaklepa posamičnih funkcij. Funkcije zaklepate s priloženim ključem, ki se nahaja na kablu daljinskega upravljalca. S premikom ključa v desno za 15° se posamična funkcija postelje zaklene.