

## Navodila za uporabo in vzdrževanje MREŽA ZA SOBNO DVIGALO

- 15.94 MREŽA ZA HORIZONTALNI PREMIK
- 15.95 MREŽA ZA TETRAPLEGIKE
- 15.97 MREŽA OSNOVNA

### NAMEŠČANJE

Pripnite mrežo na pacienta ter vstavite barvni trak v 2 kljuki nosilca. Mreža ima tri barvne pasove (kot prikazano na sliki 1 črne, rdeče in bele barve), ki ustrezajo trem različnim višinam, glede na potrebe. Zagotovite, da vstavite barvne trakove enakih barv, da ne spravite iz ravnovesja težišče.


Da prilagodite pasove potrebam pacienta, je potrebno izbrati le pravilne barvne trakove.

Vstavite pas v prvo končnico (kot prikazano na sliki 2), nato vstavite pas še v drugo kljukico (kot prikazano na sliki 3). Preverite če so pasovi pravilno vstavljeni. (enake barve).

### ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA

Za čiščenje ali dezinfekcijo uporabite vodo z nevtralnimi milom ali razredčen alkohol (50%). Standardna mreža ni primerna za uporabo na tetraplegičnih pacientih. Za takšno vrsto pacientov uporabite posebno mrežo, ki ima dodatna napenjala, za podporo glave in ročaj za asistenta.

### **OPOZORILO: NE UPORABLJAJTE VIDNO POŠKODOVANE MREŽE**

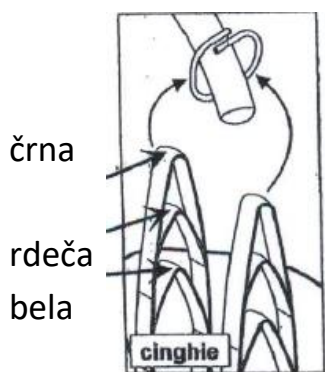

slika 1



slika 2



slika 3

Izdelki ne smejo biti modificirani. Vsaka modifikacija, vključno z montažo nadomestnih delov ali neustreznih dodatkov, lahko zmanjša varnost izdelka in razveljavi veljavnost garancije in potrdila o varnosti. Podjetje Soča Oprema d.o.o. kot distributer za VASSILLI S.p.A. ne prevzema nikakršne odgovornosti za modificirane izdelke, okvaro, nastalo kot posledica modifikacij. Podjetje ne odgovarja za malomarno vzdrževanje, tako redno kot izredno.

Etiketa na okvirju vsebuje podatke o prepoznavnosti in značilnosti izdelka. Navedeni so serijska številka in leto izdelave, številka izdelka in največja dovoljena varnostna obremenitev.

Nosilnost označena na izdelku.