

Navodila za uporabo in vzdrževanje
DESKA ZA PRESEDANJE KRATKA OD 61/1
DESKA ZA PRESEDANJE DOLGA OD 61/2
DESKA ZA PRESEDANJE BANANA OD 61/3

Tehnični podatki:

Dimenzije:

- KRATKA 65 x 27 x 0,8 cm
- DOLGA 80 x 27 x 0,8 cm
- BANANA 68 x 21 x 0,8 cm

Barva: različna

Material: melapan

Nosilnost: 120 kg

Uporaba:

- Deska se uporablja za presedanje osebe iz ene sedalne površine na drugo, tj. iz postelje na invalidski voziček, iz stola na invalidski voziček, iz invalidskega vozička v avto, itd. ter obratno.
- Presedanje z desko lahko uporabnik opravi samostojno ali pa z asistenco ene ali več oseb.
- Uporabnik položi en konec deske pod sredino svoje zadnjice, drugi konec pa naj bo položen na površino na katero se bo presedel.
- Uporabnik potem sam ali z asistenco ene ali več oseb zdrsi preko deske.
- Po uporabi desko odstrani in pospravi.

Varnostna opozorila:

Pred izvedbo samega presedanja, se je potrebno prepričati, da je deska ustrezno in stabilno nameščena na obeh sedalnih površinah ter da je razdalja med obema površinama dovolj skupaj, da je premeščanje varno.

Čiščenje in vzdrževanje:

Očistite z mehko krpo in nevtralnimi čistilnimi sredstvi. Ne uporabljajte grobe gobe. Po čiščenju desko osušimo.

Proizvajalec, prodajalec in serviser: Soča oprema d.o.o., Linhartova cesta 49 a, 1000 Ljubljana

CE Izdelek ustreza zahtevam v direktivi 93/42/CE, DL.vo n. 46/97 Class I. za medicinske naprave.