



Navodila za namestitev CONFORM zračne blazine

1. **KORAK:** Postavite blazino na sedišče tako, da so celice na vrhu. Odprite ventil v nasprotni smeri urinega kazalca.



2. **KORAK:** Priključite gumijasto cev CONFORM črpalke, na ventil. S pomočjo črpalke napihnite blazino dokler se ta ne izboči.



3. **KORAK:** Snemite cev iz ventila ter ga zaprite tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca. (Ponovite korake 1 – 3 za ostale ventile pri blazinah z več ventili).



4. **KORAK:** Uporabnika posedite na blazino tako, da ima pravilno nastavljene naslona za roke, ter podnožnika na vozičku (pravilno sedenje).



5. **KORAK:** Potisnite roko med blazino in zadnjico uporabnika tako da zatipate najnižjo kost, kar je po navadi sednica.



6. **KORAK:** Medtem, ko imate eno roko pod zadnjico, uporabite drugo za to, da odprete ventil. Na ta način spuščajte zrak iz blazine, medtem se uporabnik pogreza v njo. Ko začutite, da se prsti dotaknejo dna blazine (jih ne morete več premikati), ventil zaprite. Sedaj naj bi imeli cca. 1,25 cm zraka med sednico in dnem blazine.



Čiščenje in vzdrževanje

Priporočena je uporaba CONFORM prevlek v kombinaciji z CONFORM blazino. Naravna guma ne sme biti izpostavljena sončni svetlobi (UV-svetlobi), ker lahko povzroči prezgodnje staranje materiala.

Prevleka in blazina se lahko pere na 40-60°C. Priporočamo pranje v pralnem stroju od 30°C do 40°C (brez ožemanja). Poskrbite, da so ventili zaprti med pranjem.